

再使用禁止

ロートアイドレイン

【禁忌・禁止】


〈使用方法〉

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

眼の各組織上の水分や体液等を吸収する細長いスポンジに、
吸水した液体を受水する袋が付いている。

〈形状〉（単位：mm 受水袋 80mL）

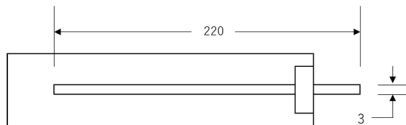

〈原材料〉

スポンジ：ポリビニルアセタール
袋：ポリエチレン

〈原理〉

吸水スポンジが水分や体液等を吸収、除去し、吸収した液体を
袋が受水する。

【使用目的又は効果】

眼科手術・処置の際、眼の各組織上の水分や体液等を吸収し、
除去する。

【使用方法等】

眼科手術・処置の際、事前に生理食塩水や精製水等の液体でス
ポンジ部分を十分に湿らせ、眼の各組織に当て吸水等を行い、
吸水した液体をポリエチレン袋内に受水させる。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

1. スポンジは、乾燥した状態で使用しないこと。[組織を傷
つけるおそれがある。]
2. スポンジは、術中、眼の近くで切らないこと。[欠片が患
者の創口に入り、異物反応を引き起こすおそれがある。]

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

1. 水濡れ及び直射日光を避け、涼しく乾燥した場所で保管
すること。
2. 包装に傷を付けたり、ピンホールを生じさせたりしない
ように保管すること。

〈有効期間〉

包装に記載 [自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

ロートニッテン株式会社
〒457-0038 名古屋市南区桜本町 40 番地の 2
TEL：052-822-5512（代表）

〈製造業者〉

セネフォーム社（Cenefom Corporation）
国名：台湾